

Алкотестер цифровой

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

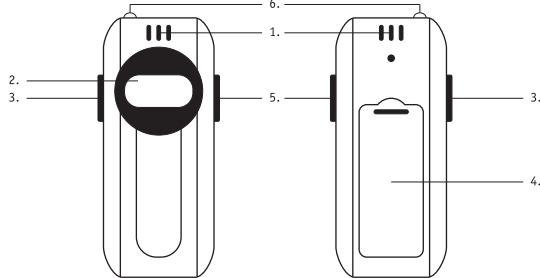


Рисунок с назначением кнопок и частей:

1. Отверстие для выдыхаемого воздуха
2. Цифровой ЖК дисплей
3. Кнопка включения
4. Батарейный отсек
5. Кнопка включения фонарика
6. Фонарик

Характеристики:

1. Цифровой дисплей и звуковая сигнализация
2. Быстрый ответ и восстановление
3. Автоматическое отключение питания
4. Автотестирование сенсора на отсутствие паров алкоголя
5. Встроенный фонарик
6. Две единицы измерения %BAC, g/l

Замечание:

Значение g/l соответствует значению в промилле

Установка батареек:

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне устройства
2. Вставьте две "AAA" батарейки соблюдая полярность
3. Закройте крышку батарейного отсека

Использование алкотестера:

1. Нажмите кнопку включения питания. Загорится дисплей и раздастся один звуковой сигнал.
2. Если батарейки разряжены на дисплее начнёт мигать надпись "LO" в течении 5 секунд.
3. На дисплее появиться надпись "WARM UP" и пойдёт обратный отсчёт 10-ти секунд. Это означает что идёт процесс нагрева сенсора.
4. После прогрева сенсора раздастся один звуковой сигнал.

5. На дисплее загорится надпись "BLOW" и начнётся обратный отсчёт 10-ти секунд. Это говорит о готовности алкотестера к измерению.
6. Выдыхайте воздух в отверстие для выдоха в течении этого времени.
7. По окончании тестирования раздастся звуковой сигнал и на дисплее отобразятся результаты теста.
8. 3 уровня содержания алкоголя:
 - Менее 0,1 промилле
 - 0,1-0,2 промилле - на дисплее появится надпись "Caution" (Предостережение) и раздастся звуковой сигнал
 - более 0,2 промилле - на дисплее появится надпись "Danger" (Опасность) и раздастся звуковой сигнал
9. Результаты теста будут высвечиваться в течении 10 сек., после этого появится надпись "OFF" и устройство автоматически выключится.

Замена батарей:

Когда на дисплее высвечивается надпись "LO" - замените батарейки на новые.

Спецификация:

Сенсор: улучшенный полупроводниковый сенсор
Диапазон: 0-1,9 промилле
Точность: 0,1 промилле
Питание: 2хAAA батарейки
Время операции: прогрев <10 сек., ответ <5 сек.
Автоматическое отключение питания: <1 мин.

Внимание:

- Проводите тестирование не ранее чем через 20 минут после употребления алкоголя.
- Перед следующим тестированием подождите 3 минуты.
- Не курите и не употребляйте продукты 20 минут перед тестированием.
- Не используйте активные вещества и растворители для чистки устройства.
- Не выдыхайте жидкость в устройство.
- Не храните рядом с алкоголем, красками, инсектицидами.
- Не храните в закрытом помещении с загрязненным воздухом.
- Для длительной службы устройства, используйте его не чаще одного раза в сутки.
- Наличие в воздухе выхлопных и других газов могут искажить результат теста.
- Запрещается вскрывать и изменять устройство.
- Персональный алкотестер предназначен только для индикации возможного присутствия алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Не следует считать полученные показания окончательными и безупречно точными в определении уровня интоксикации. Также, основываясь на результатах измерений, не следует принимать решение допустима ли полученная концентрация алкоголя для вождения автомобиля, работы на производстве или деятельности, сопряженной с опасностью. Организм любого человека по-разному реагирует на одинаковую концентрацию алкоголя, поэтому результаты измерений являются только относительными значениями, а не нормами стандарта.
- Перед началом работы с прибором внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Алкотестер цифровой



ALK-D-02



www.airline.su
Установка OTK:



Bao'an District, Shenzhen, 518131
Room 823-828, Dongming Mansion, Minjiang Road, Longhua Town,

Jiuhuayi Layn, Baoan District, Shenzhen, 518131.

Любое дополнение: Romatra 823-828, Minjiang Road, Shenzhen, 518131.

у. Камарка, А.9, ул. Б. Тел: +8-812-336-23-93, com@airline.su

000 "ЭПЛАН", 192007 Россия, г. Санкт-Петербург,

Паспартуно и нэроэнео 000 "ЭПЛАН" в КНР

He наакнт ограатенхон септнекаин

автомонипхие аксессуари



Линяне от 2хААА батареек (б комаркт he boxat)

Звуковое напоминение

Быстроходий септнекаин фонарь

Лифобон крк античес

Лианао нэмепхна: 0-1,9 номнире

ALK-D-02

Алкотестер цифровой